

いつも、インシデント報告ありがとうございます 京大病院医療安全情報31

輸液ポンプの作動確認は確実に

<部署からの報告>

14時30分、2/Hでシリンジポンプの更新を行った。23時に残量チェックしたところ、本来18ccは減ってないといけないところ、9ccしか減っていなかった。輸液ポンプのアラームは鳴っておらず。不具合と考えシリンジポンプを交換し、MEセンターに点検にだした

<MEからの報告>

シリンジポンプの作動内容歴を確認したところ、更新時間の14時30分には電源ONと早送りをしたのみで開始ボタンは押されておらず、17時30分に改めて開始ボタンが押されていた。よって、ポンプの故障ではなく開始ボタンの押し忘れであった

フランジはきちりはまっていますか

押し子のセットは大丈夫？

正しく点滅していますか

開始ボタンは押しましたか

流量は正しいですか

セッティングがうまくできていても、開始ボタンを押していなければ点滴は開始されません。また、開始ボタンを押していなければ、アラームが鳴ることはありませんので、セットした後は、必ず指さし呼称で確認をしてください