


いつも、インシデント報告ありがとうございます

# 京大病院医療安全情報34


## 【思わぬ呼吸器の設定変更】

### 事例

サーボ使用中に、誰も呼吸器の設定を変更していないのに一回換気量が400mlから390mlに変わっていた、というインシデントがありました。

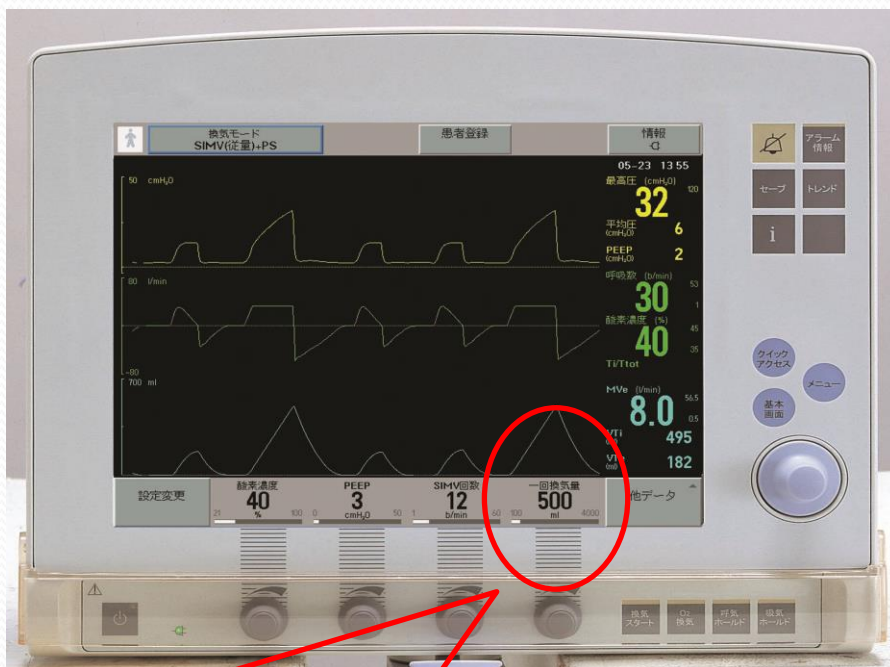

MEセンターで検証した結果、意外な事実が判明しました。  
次ページをご覧ください！！！！

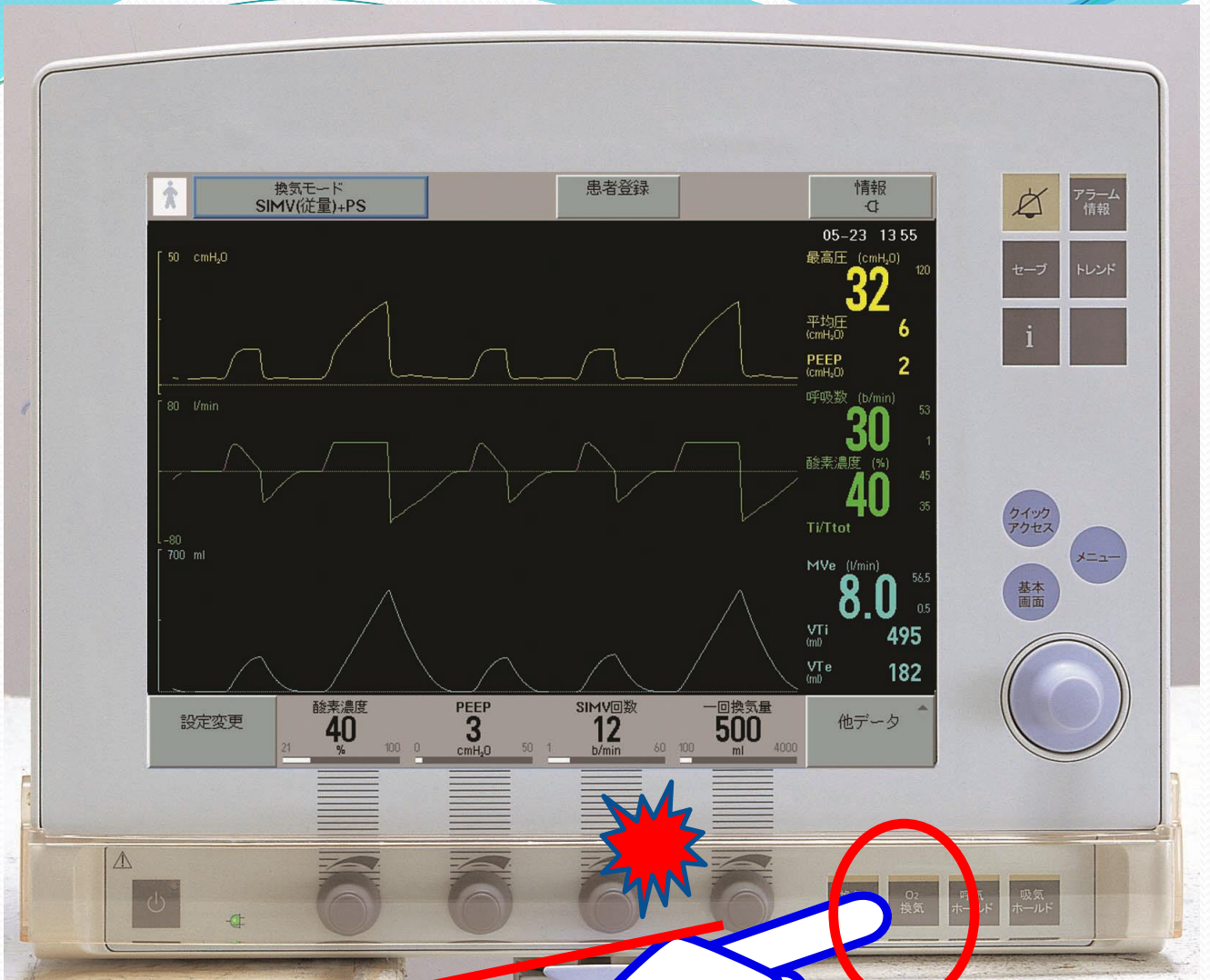

「O<sub>2</sub>換気」ボタンを押す時に呼吸器の左側より手を伸ばしてアプローチすると、**無意識に**一番右端のダイヤルに指が触れ、容易に設定が変わることがわかりました。

知らないうちにダイヤルに触れているかもしれません・・・

**呼吸器を操作する時は、正面から確実に押す！**