

いつも、インシデント報告ありがとうございます

2016.9.5

京大病院医療安全情報83

【車椅子搬送時のトラブル】

(第2報)

2012年に京大病院医療安全情報21で情報提供しましたが、類似事例が発生していますので、再度お知らせします。

立位にてX線撮影後に患者がバランスを崩した。後方に車椅子を設置していたが、酸素ボンベと点滴ポンプの重みにより、車椅子ごと後ろへひっくり返った。



積貞棟の車いす



手すりが外れる
介助用の車椅子

上記の車椅子は比較的軽量設計されているので、後方に荷物を載せすぎると後転してしまう危険があります。



付属品が多い時は、点滴棒は別にして可能な限り二人で搬送してください。

インシデント報告に基づいた対策です

京大病院医療安全情報83

【車椅子搬送前のチェックポイント】



点滴の残量は大丈夫？

輸液ポンプの設定と充電は大丈夫？

移乗する時、**両方**のストッパーが止まっていますか？

酸素は開栓されている？残量は充分？

付属品が重くて車いすが後ろに倒れませんか？

